
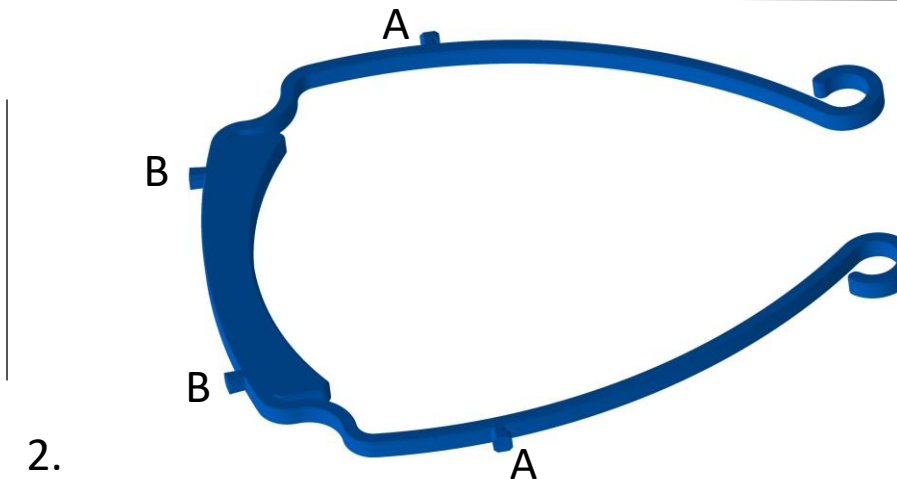


Contenu d'un kit

1. Feuille PVC transparente A4 150 µm, pré-percée avec 4 trous
2. Support plastique PLA imprimé en 3D
3. Notice d'assemblage

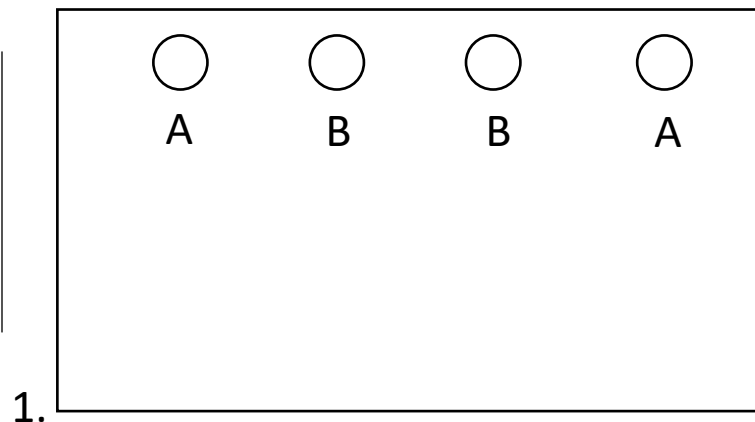

Instructions de Montage

Attachez la feuille transparente (1) sur le support plastique PLA (2). Commencez par assembler les deux trous centraux (B) et (B) de la feuille transparente avec les deux ergots (B) et (B) du support plastique. Assemblez ensuite les deux côtés (A) et (A) correspondants en veillant à bien étendre la feuille plastique transparente pour éviter des faux-plis.

Instructions d'utilisation

Nous recommandons que chaque utilisateur assemble sa propre visière afin d'éviter la contamination. Chaque visière est emballée et à usage personnel. Ce dispositif est un instrument de protection contre les projections (ex: gouttelettes) à utiliser en complément des protections recommandées. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical réglementé de marque CE. Il reste sous la responsabilité de son utilisateur et a été développé en réponse à l'urgence sanitaire provoquée par le COVID-19. L'équipement peut être nettoyé avec un désinfectant de surface. Un élastique peut-être ajouté à l'arrière pour améliorer la tenue.